

## Instrukcja używania

# DEKOPTYAL MD

**DEKOPTYAL MD** to jatkowe, lepkie, przezroczyste, nawilżające i odżywcze krople do oczu oparte na prowitaminie B5.

Prowitamina B5 wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki. Dzięki właściwością mukoadhezyjnym HydrFlexu film łzowy jest zachowany tak, że powierzchnia oka jest lepiej chroniona.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

**DEKOPTYAL MD** chroni oko przed dolegliwościami takimi jak uczucie suchości i w przypadku zmęczonych i podrażnionych oczu. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu jest złagodzone lub całkowicie zredukowane.

**DEKOPTYAL MD** może być stosowany bez specjalnych ograniczeń i jest dobrze tolerowany.

**Skład:** Substancje aktywne – Dekspan-tenol 2%, Hydroksypropyloceluloza (HydraFlex) 0,5%, konserwant – Polihexamid 0,0001%.

### Zastosowanie:

W przypadku podrażnienia lub pieczenia oczu, a także ich zaczerwienienia i uczucia zmęczenia, które mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak:

- podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych
- długotrwałe patrzenie na ekran bądź długotrwałe prowadzenie pojazdów: samochodu lub motocyklu
- klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, woda w basenie itp.

### Sposób stosowania:

**DEKOPTYAL MD** można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

**A: Bezpośrednio do oczu** (osoby noszące szkła kontaktowe nie muszą ich wyjmować):

- przyłożyć palec wskazujący do dolnej powieki oka i lekko ją pociągnąć w dół
- postępując się drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; uważać, aby końcówka nie dotykała powierzchni oka!
- zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrugać 2 lub 3 razy, aby preparat został równomiernie rozprowadzony na powierzchni całego oka

### B: Za pośrednictwem soczewek kontaktowych:

- ułożyć soczewkę na środkowym palcu;
- nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę, a następnie włożyć soczewkę do oka;
- zamrugać okiem 2 lub 3 razy.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Nie stosować razem z innymi lekami do oczu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie używać w przypadku zakażenia oczu. Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników preparatu.

**Ostrzeżenia:** Nie stosować po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia.

Nie stosować po terminie ważności. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C.

Zamknąć butelkę bezpośrednio po użyciu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów lub podrażnienia, należy skontaktować się ze specjalistą.

**Działania uboczne:** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu **DEKOPTYAL MD**


**Opakowanie:** 15 ml **DEKOPTYAL MD**

### Objaśnienia użytych symboli:

 – Wyrób jatkowy


 – Ostrzeżenia

 – Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C

 – Termin ważności

 – Numer serii

 – Znak zgodności

 – Wytwórca

 **STERILE A**

Wytwórca:

Melleison Pharma B.V.  
NL-4817 ZH 7384 Breda

**Dystrybutor:** Ofta Sp. z o.o.  
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 2U  
01-015 Warszawa

Data aktualizacji: 05/2015

04REF1001